



移動シート「マルチ」取扱説明書



このたびは、移動シート「マルチ」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読み下さい。またこの説明書は必要なときに取り出しやすい場所に保管しておいて下さい。

●特徴

筒状のシートで、縦・横・斜めと自由自在に動かせるため、あらゆる方向への移動を行うことができます。また、従来のスライディングシートと異なり、薄いシート状のため持ち運びにも便利で使いやすくなっています。

●使用方法

内側素材が滑りやすく、外側は滑りにくい加工となっております。タグの付いている側を表にして使用して下さい。



使用上の注意

1. 移乗・移動を行った後は、必ず「マルチ」を取り除いて下さい。敷き込んだまま放置するとムシの原因となります。
2. 使用後は、床の上やベットサイドなどに放置しないで下さい。滑ってケガをする恐れがあります。

●洗濯方法

80℃以下の温水又は水で洗濯可能。

石鹸を使ったの洗浄や、アルコールを使用して表面をふきとり消毒することができます。

タンブル乾燥機をご使用の際は低温で行って下さい。

柔軟仕上げ剤、漂白剤は使用しないで下さい。本来の機能が損なわれる恐れがあります。

ドライクリーニングはできません。

●商品規格

サイズ : 60×60cm (小)

100×72cm (大)

素材 : PUコートナイロン

商品に関するお問い合わせ先は

ラックヘルスケア株式会社

大阪 〒542-0081 大阪市中央区南船場 2-10-2
東京 〒108-0014 東京都港区芝 3-43-16 KDX 三田ビル 11F
九州 〒862-0924 熊本市中央区帯山 2-1-23 パービル帯山 1F

TEL06-6244-0636 FAX06-6244-0836
TEL03-5419-8050 FAX03-5419-8051
TEL096-340-8101 FAX096-340-8102

コード NO.2014.07