



## 「グリップシート」取扱説明書



このたびは、「グリップシート」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読み下さい。またこの説明書は必要とときに取り出しやすい場所に保管しておいて下さい。使用環境や使用者の身体状況が変化した際には再度お読み下さい。



### ●特徴

「グリップシート」は特殊なシート構成とメーカー独自の HLF (Hyper Low Friction) 素材を使用しているため、ベッド上での位置修正が容易に行えます。またスリングシートを装着する際に、併用することで体の下に容易に差し込めます。またグリップがたくさんついているので、装着や、取り外し、移動させる際などに便利です。

●使用方法 ベッド上の位置修正、スリングシートの装着などが容易に行えます。



### 使用上の注意

ご使用にあたり理学療法士;作業療法士などの専門家もしくは販売店にご相談いただき、正しく使用して下さい。

- ・ 使用する前に必ず各部のほつれや破損が無いことを確認してからご使用下さい。
- ・ ベッドで上方移動を行なう際は頭部を守るために枕をご使用ください。

### ●洗浄方法

- ・ 80℃以下の温水または水で洗浄可能
- ・ アイロンのご使用はできません。
- ・ タンブル乾燥機をご使用の際は低温で行って下さい。

### ●商品規格

MADE IN DENMARK

サイズ：S：200×60cm M：200×80cm

素 材：ポリエステル

最大耐荷重：140kg

商品に関するお問い合わせは  
**ラックヘルスケア株式会社**

大 阪 〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場 2-10-2

東 京 〒105-0014 東京都港区芝 3-43-16 KDX 三田ビル 11F

九 州 〒862-0924 熊本県熊本市中央区帯山 2-1-23 パーケル帯山 1F

TEL06-6244-0636 FAX06-6244-0836

TEL03-5419-8050 FAX03-5419-8051

TEL096-340-8101 FAX096-340-8102

コード No.2014.07