



「ミニマスター」取扱説明書



このたびは、「ミニマスター」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読み下さい。またこの説明書は必要なときに取り出しやすい場所に保管しておいて下さい。使用環境や使用者の身体状況が変化した際には再度お読み下さい。



●特徴

「ミニマスター」は、紺色の内面が滑りにくい素材で、両端には大きさの異なる持ち手が2つ付属されていますので、利用者の体格や状況により使い分けることが可能です。また半分に折り曲げることができるので、マスターグライドの座位移乗時などに併用できます。



●使用方法

ベッド上での移動や立ち上がりの介助などのさまざまな場面で活用いただけます。



使用上の注意

ご使用にあたり理学療法士;作業療法士などの専門家もしくは販売店にご相談いただき、正しく使用して下さい。

- ・ 使用する前に必ず各部のほつれや破損が無いことを確認してからご使用下さい。
- ・ 立ち上がり及び座らせる介助で使用する場合、立位の取れない方には使用しないで下さい。

●洗浄方法

- ・ 80℃以下の温水または水で洗浄可能
- ・ アイロンのご使用はできません。
- ・ タンブル乾燥機をご使用の際は低温で行って下さい。

●商品規格

サイズ：S：50×20cm M：60×20cm

素 材：ポリエステル、ナイロン

最大耐荷重：135kg

MADE IN DENMARK

商品に関するお問い合わせは
ラックヘルスケア株式会社

大 阪 〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場 2-10-2
東 京 〒105-0014 東京都港区芝 3-43-16 KDX 三田ビル 11F
九 州 〒862-0924 熊本県熊本市中央区帯山 2-1-23 パール帯山 1F

TEL06-6244-0636 FAX06-6244-0836
TEL03-5419-8050 FAX03-5419-8051
TEL096-340-8101 FAX096-340-8102

コード No.2014.07