



## 「マスターベルト」取扱説明書



このたびは、「マスターベルト」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読み下さい。またこの説明書は必要に応じて取り出しやすい場所に保管しておいて下さい。使用環境や使用者の身体状況が変化した際には再度お読み下さい。



### ●特徴

「マスターベルト」は立ち上がらせたり、座らせたりする際や、歩行時のサポートとしてご使用できます。ベルトは幅広で、やわらかく腰部にフィットする形状。また握りやすいグリップが縦と横にたくさん付いています。バックルはサイドロック式で装着・取り外しが容易に行えます。



### 使用上の注意

ご使用にあたり理学療法士;作業療法士などの専門家もしくは販売店にご相談いただき、正しく使用して下さい。

- ・ 使用する前に必ず各部のほつれや破損が無いことを確認してからご使用下さい。
- ・ 立位の取れない方への立位移乗単独での使用はしないで下さい。
- ・ プラスチックバックル部の装着は、音が「カチッ」となるまで確実に留めて下さい。

#### 装着方法



左写真のように腰部に斜めに巻き、ベルトの端を引き、長さを調整して下さい。

#### 取り外し方法



バックルの赤い部分を押し取り外して下さい。

### ●洗浄方法

- ・ 80℃以下の温水または水で洗浄可能（柔軟剤のご使用はできません）  
（洗濯機ご使用の際はバックル保護のため、バックルを留めたままネットに入れて洗浄して下さい）
- ・ アイロンのご使用はできません。
- ・ タンブル乾燥機をご使用の際は低温で行って下さい。

### ●商品規格

MADE IN DENMARK

サイズ：S：62～100cm M：72～120cm（\*左記サイズはウエストサイズの目安です。）

素 材：ポリエステル、ポリエチレンフォーム、ポリウレタンコートナイロン

最大耐荷重：140kg（グリップ1つあたりの耐荷重は45kgを超えないこと）

商品に関するお問い合わせは  
**ラックヘルスケア株式会社**

本 社 〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場 2-10-2  
東京支店 〒105-0014 東京都港区芝 3-43-16 KDX 三田ビル 11F  
九州支店 〒862-0924 熊本市中央区帯山 2-1-23 パール帯山 1F

TEL06-6244-0636 FAX06-6244-0836  
TEL03-5419-8050 FAX03-5419-8051  
TEL096-340-8101 FAX096-340-8102

コード No.2014.07