



移動シート「マルチロール」取扱説明書

このたびは、移動シート「マルチロール」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読み下さい。またこの説明書は必要なときに取り出しやすい場所に保管しておいて下さい。使用環境や使用者の身体状況が変化した際には再度お読み下さい。



●特徴

「マルチロール」は表裏の両面が特殊加工の滑る素材を使用しているため、ベッド上での位置修正が容易に行えます。10mのロールを好みの大きさに切ってご使用いただけます。

●使用方法

ベッド上での上方移動や、横移動など摩擦を軽減し、持ち上げずに容易に行えます。
お好きな大きさにカットしてご使用下さい。（1本で従来のマルチ大：10枚、小：18枚相当です）



使用上の注意

1. 移乗・移動を行った後は、必ずカットした「マルチロール」を取り除いて下さい。敷き込んだまま放置するとムシの原因となります。
2. 使用後は、床の上やベットサイドなどに放置しないで下さい。滑ってケガをする恐れがあります。

●洗濯方法

80℃以下の温水又は水で洗濯可能。

石鹸を使っての洗浄や、アルコールを使用して表面を消毒することができます。

タンブル乾燥機をご使用の際は低温で行って下さい。

アイロンのご使用はできません。

柔軟仕上げ剤、漂白剤は使用しないで下さい。本来の機能が損なわれる恐れがあります。

●商品規格

サイズ : 150cm x 10m

重量 : 約1.5kg

素材 : ナイロン

商品に関するお問い合わせは

ラックヘルスケア株式会社

大阪 〒542-0081 大阪市中央区南船場2-10-2
東京 〒108-0014 東京都港区芝3-43-16 KDX 三田ビル11F
九州 〒862-0924 熊本市中央区帯山2-1-23 パービル帯山1F

TEL06-6244-0636 FAX06-6244-0836
TEL03-5419-8050 FAX03-5419-8051
TEL096-340-8101 FAX096-340-8102