



## ウォーキースローダウンブレーキ取付方法


- ①パーツを取り出し、不足部品などがいないかを確認してください。  
 次に、スローダウンブレーキ本体から固定ナットをゆるめてボルトを外してください。

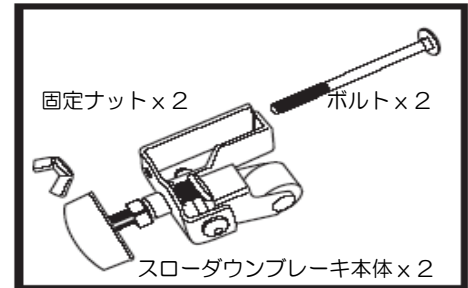


- ②スローダウンブレーキ本体を後輪ブレーキパッド下に前方から差し込んでください。  
 (右図参照)

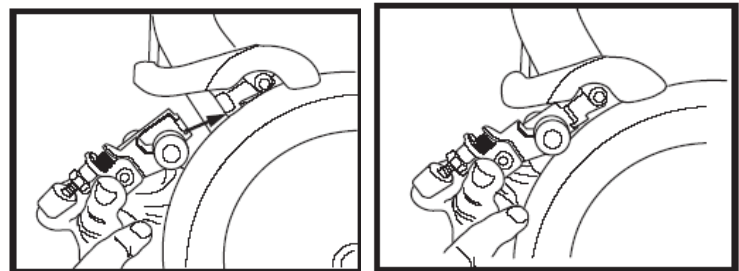


- ③ボルトをタイヤ後方より差し込み、スローダウンブレーキ本体に通します。

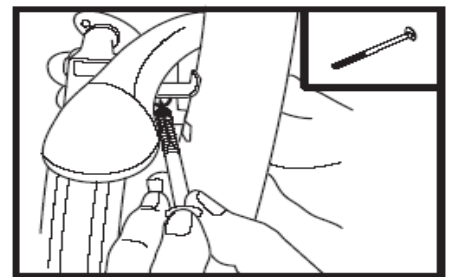

- ④スローダウンブレーキ本体に通したボルトを固定ナットで締め、本体を固定してください。その後本体に緩みがないかどうかを確認してください。

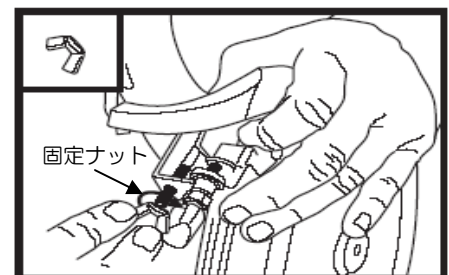

- ⑤スローダウンブレーキの強弱は調整ネジで調整します。  
 右に回していくと抵抗が強くなり、左に回し緩めると弱くなります。

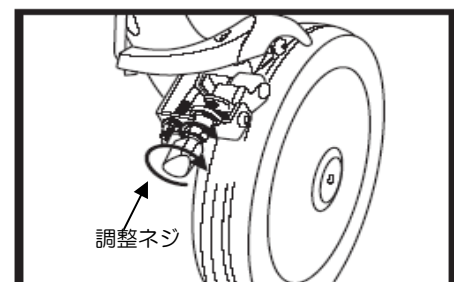

商品に関するお問い合わせ先は

### ラックヘルスケア株式会社

大阪 〒542-0081 大阪市中央区南船場 2-10-2 TEL06-6244-0636 FAX06-6244-0836  
 東京 〒108-0014 東京都港区芝 3-43-16 KDX 三田ビル 11F TEL03-5419-8050 FAX03-5419-8051  
 九州 〒862-0924 熊本市中央区帯山 2-1-23 パークヒル帯山 TEL096-340-8101 FAX096-340-8102  
 コード NO.2014.07