

# ソフトナース取扱説明書

このたびは、ソフトナースをお買い求め頂きまして誠にありがとうございます。  
本製品のご使用前には必ず「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全に使用して下さい。  
また「取扱説明書」は必要なときに取り出しやすい場所に保管して下さい。



コード No. 2016.03

ソフトナースは、特別に開発された特殊ウレタンフォームでできております。  
特に粘性、弾性、耐久性に優れており、これらの特性によって体圧分散をより効果的に  
行い、局所的圧迫を軽減します。



注意 全てのケースの褥瘡を予防できるわけではありません。  
万一ご使用中に少しでもご使用者の身体に発赤がみられるようであれば、  
医師または専門家にご相談下さい。

## ソフトナースをより有効的に使用するには

- ※ ピンクは凸凹のある面を上にして敷いてください。  
グレー/ピンクはピンク側、イエロー/ピンクはイエロー側が上になります。  
(お好みの硬さの面を上にしても特に問題はありません。)
- ※ オーバーレイタイプとして、ベッドマットレスの上に敷いてください。
- ※ ソフトナースは特殊な構造になっており、汗などの水分を吸収、拡散、蒸発させます。  
シーツを使用する際は吸水性の高いものをご使用下さい。
- ※ 使用者の体重を目安にして選択ください。  
40kg～70kgの方・・・ピンク  
70kg以上の方・・・・・・グレー/ピンク  
(上記体重区分はあくまでも目安です。使用者の症状によっては、体重区分以外のものを選択する場合があります。)
- ※ 褥瘡リスクの高い方向け  
0kg～130kgまで・・・イエロー/ピンク

## ご使用上の注意について



注意 湿疹などのアレルギー症状が見られる場合には、直ちにご使用を中止してください。



注意 ソフトナースは、MVSS302 スタндартに基づく難燃度を有しておりますが、日本で特別に難燃性試験を受けておりません。  
400℃以上で発火します。

- ※ 血液、体液、失禁などにより汚染された場合には、アルデヒド基（別名グルタラル）、ホルマリン系で消毒し、さらに95℃までの温水で洗濯してください。  
また必要に応じてオートクレーブで滅菌してください。
- ※ ソフトナースは汗などを吸収、拡散、蒸発させますが、その他の成分はフォーム内に残留します。1～3ヶ月毎の洗濯をお勧めいたします。  
また汚染した場合には、その都度洗濯するようにしてください。
- ※ 一般的にウレタンフォームは人体に無害であると考えられておりますが、幼児や子供が口に入れないように十分注意を払ってください。
- ※ ウレタンフォーム上に気泡状の穴が見られる場合がありますが、これは製造上生じるものでソフトナースの特性を損なうものではありません。

## 洗濯・消毒方法について

- ※ 洗濯機を使用される場合は、ぬるま湯に浸すことをお勧めします。柔らかくなりますので適度に絞った後、洗濯機へ入れてください。
- ※ ソフトナースを3分割に切ることで、洗濯時の取り扱いがさらに容易になります。
- ※ 洗濯には95℃までの温水をご使用ください。
- ※ 洗濯には家庭用洗剤（中性洗剤）をご使用ください。
- ※ 家庭用洗剤と一緒に柔軟剤のご使用もお勧めします。
- ※ 洗濯ネットをご使用になれば本体への損傷を軽減します。
- ※ 洗濯することによって変色していきますが、本来の機能を損なうものではありません。
- ※ 塩素系漂白剤を使用しますと変質しますので、ご使用は避けてください。
- ※ オートクレーブ滅菌(105℃)が可能です。
- ※ 消毒薬を使用する際は、随時弊社営業担当へ確認してください。

### 輸入販売元

#### ラックヘルスケア株式会社

大阪 〒542-0081 大阪市中央区南船場 2-10-2

TEL:06-6244-0636 FAX:06-6244-0836

東京 〒105-0014 東京都港区芝 3-43-16 KDX 三田ビル 11F

TEL:03-5419-8050 FAX:03-5419-8051

九州 〒862-0924 熊本市帯山 2-1-23 パーレル帯山

TEL:096-340-8101 FAX:096-340-8102

MADE IN DENMARK