

### はじめに



#### 滑り止め

内側はベルベットタッチの滑り止め素材を使用し、ズレ上がりにくい構造

#### ハンドグリップ

人間工学に基づいた握りやすいグリップが縦と横にたくさん付属

#### バックル

サイドロック式採用で簡単に装着・取り外しが可能



#### Point

グリップがつぶれにくい独自の製法で、いつでもしっかりと安全に握れます

#### 使える!

ベルト幅は広く、やわらかい素材なので、身体への食い込みを防止します。また独自のラウンド形状が背中にフィットし、より快適にサポートします。



#### 装着方法



バックル部を「パチン」と音がなるまで確実に留めます。



バックルが付いている方の端と、ベルトの端を交差させるように引き、調整します。

#### 取外方法




バックルの赤色部をしっかりと押し、てください。

### 使用例

#### 立ち上がりのサポート

使用例①

介助者はできるだけ利用者の自然な動きに合わせるように、斜め上方に引くようにサポートします。  
\* 介助者も装着することで、お互いに持ち場を提供でき、より安定したサポートができます。

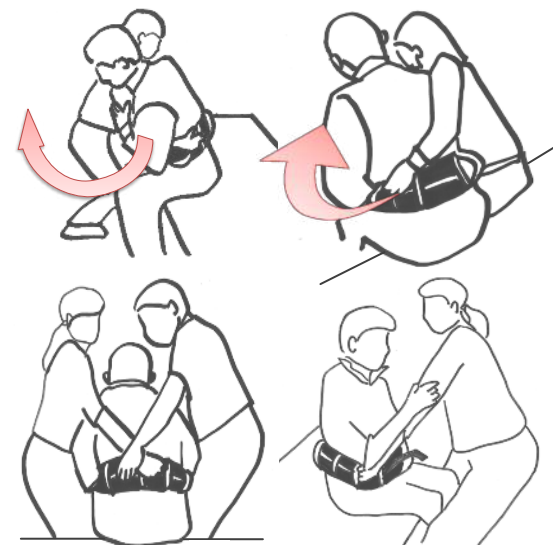

#### 座位移乗時併用 + マスターグライド 使用例②

マスターグライドを使用した座位移乗時のサポートとして、前・後から安定してサポートができます。



#### 歩行時のサポート

使用例③

介助者は歩行時のサポートや、転倒防止にグリップを持ち支えます。

