



「マスターグライド」取扱説明書



このたびは、「マスターグライド」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読み下さい。またこの説明書は必要なときに取り出しやすい場所に保管しておいて下さい。使用環境や使用者の身体状況が変化した際には再度お読み下さい。




●特徴

「マスターグライド」は、ベッド⇄車いす間等に橋渡しをして、座ったままの姿勢で移乗が行えます。ベッド⇄車いすの他に、車いす⇄トイレ：車いす⇄自動車などの移動にご使用いただけます。表面はすべり易く、裏面は滑り止め加工が施されておりますのでスムーズな移動が可能です。グリップが3か所ついているため、持ち運びや、お尻の下に差し込む際に便利です。

●使用方法

利用者の移動させる側のお尻を浮かせ、お尻半分が掛かるようにボードを差込みます。移乗後はボードを上方に引き上げるようにして取り外します。使用時に上部持ち手部分を谷折りすると、車いすタイヤに緩衝しにくくなります。

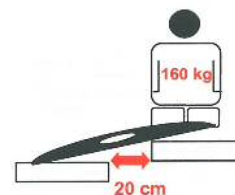

⚠️ 使用上の注意

ご使用にあたり理学療法士・作業療法士などの専門家もしくは販売店にご相談いただき、正しく使用してください。

- ・ 移乗時には、必ず車いすのブレーキやベッドのキャスターにロックがかかっていることを確認してください。また、車いすはアームサポート；レッグサポートの取り外せるものを使用してください。
- ・ 橋渡しの距離は 20cm 以内としてください。
- ・ ご使用にならない場合は高温になる場所は避け、ボードを平らな状態にして保管してください。
- ・ 上部持ち手部分を谷折りに曲げることができますが、極端な折り曲げや反対方向への折り曲げ、または必要以上に繰り返し折り曲げを行うことは、破損の原因になりますのでおやめください。

●洗浄方法

80℃以下の温水又は水で洗浄可能。＊アルコール消毒可

●商品規格

MADE IN DENMARK

サイズ（長さ×幅）：S；40×35cm M；60×35cm L；75×35cm

素 材：ポリエチレン 最大耐荷重：160kg

商品に関するお問い合わせは
ラックヘルスケア株式会社

本 社 〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場 2-10-2
東京カブ 〒105-0014 東京都港区芝 3-43-16 KDX 三田ビル 11F
九州カブ 〒862-0924 熊本市中央区帯山 2-1-23 パール帯山 1F

TEL06-6244-0636 FAX06-6244-0836
TEL03-5419-8050 FAX03-5419-8051
TEL096-340-8101 FAX096-340-8102

コード No.2014.07